

## Gamme Oxalis Attache-poignets

**Gamme Oxalis** : gamme de produits conçue pour répondre aux exigences de sécurité, de confort pour le patient et de maniabilité pour le personnel soignant.





Attache-poignets	
Dimensions (en cm)*	
07.1774	Bande néoprène 22,5 x 9,5 cm Sangles de 5 et 13 cm

\*Dimensions données à titre indicatif

### Conseils d'installation

1. Enrouler le Néoprène autour du poignet.
2. Fermer la petite boucle et régler la petite sangle.
3. Fermer la grande sangle autour du support en s'assurant qu'elle entoure bien le support et le poignet.

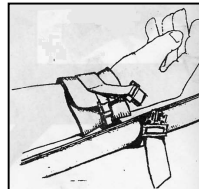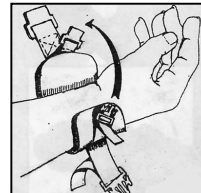

Limite d'utilisation : Ne convient pas aux personnes très agitées.

### Composition :

- Néoprène : Caoutchouc Chloroprène
- Sangles : 100% Polypropylène
- Boucles : 100% Acétal

### Entretien :



Retirer les bandes Néoprène avant le passage en machine  
 Fixer les bandes auto-agrippantes et fermer les boucles avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

**Garantie** : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.